

## Guide de référence rapide LeakControl

### Objectif

Pour vérifier l'absence de fuite(s) sur un endoscope flexible.

### Portée

Il est conseillé d'effectuer le test d'étanchéité, tel que décrit dans ce protocole de référence rapide, avant tout nettoyage manuel. Cette procédure s'adresse aussi bien au personnel du service de stérilisation qu'aux infirmières en endoscopie.

### Référence pour le test d'étanchéité de l'endoscope à l'aide du LeakControl

L'endoscope est placé sur un tapis (en cellulose) dans le conteneur de transport, puis suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un test d'étanchéité:

#### Configuration

- Mettez Leak Control en marche (interrupteur à l'arrière du testeur d'étanchéité).
- Raccordez le tuyau du Leak Control au connecteur du testeur d'étanchéité.



#### Opération

- Appuyez sur le bouton de démarrage du Leak Control.
- Attendez que l'endoscope soit pressurisé ; cela se voit au voyant rouge qui clignote.
- Immerger l'endoscope dans son intégralité dans l'évier contenant de l'eau avec du liquide de nettoyage. Il est également possible de ne pas utiliser de bain-marie.
- Remuez bien l'embout et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite (des bulles d'air apparaîtront lorsqu'il sera immergé). S'il n'y a pas de fuite, le voyant vert du LeakControl clignote.
- En cas de fuite, le témoin lumineux devient rouge et un texte apparaît à l'écran. Dans ce cas, suivez la procédure relative à la manipulation d'un endoscope défectueux.

#### Nettoyage

- Effectuez un pré-nettoyage manuel selon votre procédure connue.
- Effectuez le pré-nettoyage manuel sous pression du LeakControl.
- Retirez de l'eau l'ensemble de la lunette, toujours connectée au LeakControl, si elle est immergée.



- Appuyez sur le bouton d'arrêt pour dégonfler l'endoscope.
- Si le voyant vert est constamment allumé, l'endoscope est peut-être déconnecté de LeakControl.
- L'endoscope peut maintenant être placé dans le bac de désinfection pour une désinfection en machine.
- Pour ce faire, suivre la procédure de désinfection en machine de l'endoscope flexible.

